

Gairote



POLE IDEAL PARS






Put tourniquet elastic ribbon around arm and snap-on

نوار گارو را دور بازوی بیمار قرار داده آن را قفل کنید



Pull the elastic ribbon & tighten to reach the desired pressure on arm/wrist

نوار را تا رسیدن به اندازه دلخواه بکشید (دور مج یا بازو)

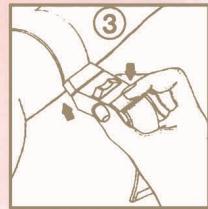

Press the slow release function key, after finishing the process.



Press the quick release key, unlock the tourniquet, and then remove it from arm/wrist

پس از فشردن کلید رها سازی ، قفل را باز کرده
نوار را از دور بازو یا مج بیمار جدا سازید

قابلیت استفاده آسان با یک دست

▪ بدون گاز گرفتن ، جمع و یا گیر کردن پوست هنگام باز و بسته نمودن

▪ نوار انعطاف پذیرکشی لطیف - مهربان با پوست بیماران - بدون استفاده از لاتکس

▪ قفل پلاستیکی با کیفیت بالا و با دوام - ساخته شده از مواد ABS

▪ دسترسی آسان به کلیدها

▪ باز شدن خودکار فقط با فشردن یک کلید

▪ مقاوم در برابر باز شدگی های خود به خود و ناشی از تماس تصادفی دست با کلید

▪ نوار قابل شستشو و تعویض

▪ قابلیت اتو کلاؤ شدن تا دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد در فشار یک آتمسفر

▪ کم حجم ، سبک با قابلیت حمل آسان در رنگهای شاد و متنوع

Simple one hand operation

▪ No pinching, catching or jamming of the skin during tightening and release

▪ Soft, elastic, latex free ribbon - skin friendly

▪ High quality buckle made from ABS

▪ Easy access to function keys

▪ One button automatic release

▪ Non unintentional opening

▪ Replaceable and washable ribbon

▪ Autoclavable up to 121°C at 1 bar

▪ Compact, handy, easy to carry

▪ Available in various animated colors

A

B

جدا کردن گارو از دست پس از خونگیری و تزریق وریدی

A

Removing tourniquet after
finishing blood drawing or
i.v.injection process.

قبل از انجام خونگیری یا تزریق وریدی

B

Before blood drawing from
vein or i.v. injection process.

