



AV HOME BLEACH

Bleaching Gel, 35% Carbamide Peroxide

ژل بلیچینگ خانگی

2 x 3 cc

ISO13485
REF: AV 1101
LICENSE: 75948911



Unit 15 - No. 87 - Between 23th & 25th
South Gandhi St. Tehran - Iran
(Avijeh Teb Parsin co)
Tel: + 98 (021) 86088320
MADE IN IRAN AV DENT



PROTECTION



IRRITANT



TEMPERATURE



SHELF LIFE



ONLY

شرح کالا:

ژل بلیچینگ خانگی حاوی ۳۵٪ کارباماید پراکساید، جهت سفید کردن دندان مورد استفاده قرار می گیرد. وجود یون های فلوراید و پتاسیم نیترات در این محصول سبب کاهش ایجاد حساسیت و میزان تخریب در دندان شده و کارایی آن را بالایی برد. همچنین به دلیل وجود یون کلسیم از کاهش سختی دندان تا حد بسیار زیادی جلوگیری می شود. به دلیل خورندگی و پایداری کم هیدروژن پراکساید از کارباماید پراکساید به عنوان ماده موثره استفاده شده است.

بسته بندی:

۲ سرنگ حاوی ۳ ml ژل

کاربرد:

- سفید کردن دندان

ویژگی:

- حاوی پتاسیم نیترات و یون فلوراید جهت جلوگیری از ایجاد حساسیت و تخریب سطح دندان
- حاوی یون کلسیم جهت جلوگیری از کاهش سختی دندان
- حاوی بیش از ۲۰ درصد آب جهت جلوگیری از خشکی دندان
- خاصیت تیگستروپیک
- شستشوی آسان

طریقه مصرف:

- یک خط ژل پیوسته را درون تری ریخته به طوری که سطح خارج دندان جلویی را بپوشاند.
- تری با دقت در دهان قرار داده شود، از فشردن تری خودداری کنید.
- ژل اضافی با مسواک یا پارچه نرم از روی لثه برداشته شود.
- پس از اتمام زمان اعمال (محدود ۳۰ الی ۴۵ دقیقه در روز)، ممل به صورت کامل با آب شستشو داده شود.

نکات قابل توجه:

- عدم توصیه برای خانم های باردار، کودکان، افراد با مصرف بالای سیگار و الکل، افراد دچار التهاب و آسیب های دهانی و همچنین افراد دارای دندان های پوسیده و یا ترمیم های ناقص.
- مسواک زدن دندان ها پیش از استفاده از ژل بلیچینگ
- جلوگیری از بلع ژل توسط بیمار
- مراجعه به پزشک در صورت استمرار احساس ناراحتی موقت در دندان یا لثه
- عدم استفاده پس از تاریخ انقضا
- قبل از استفاده، سرنگ را به مدت ۳۰ دقیقه جهت هم
- دما شدن ژل از یخچال خارج کنید.

شرایط نگهداری:

- در جای خنک (در یخچال)، دور از تابش مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال